

Электрический компрессионный лимфодренажный массажер для ног Defender Bio Elit FT-01

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: Не используйте это устройство для дополнения или замены какого-либо лечения, которое вы в настоящее время получаете. Если вы испытываете какую-либо необъяснимую боль, проходили лечение по поводу проблем с кровообращением или сосудами или пользуетесь домашним медицинским оборудованием, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.



1. Перед использованием нашего продукта, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете область применения, методы эксплуатации, меры предосторожности и т.д.
2. Если у вас возникли какие-либо проблемы с качеством товара, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом. Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте самостоятельно.
3. Данный продукт является бытовым электронным медицинским изделием, которое не подходит для диагностики, лечения и других коммерческих целей и не может заменить лекарства и медицинское оборудование.
4. Данным изделием не разрешается пользоваться детям и людям с ограниченными возможностями, а также лицам с сенсорными недостатками. Пожалуйста, используйте массажер только под наблюдением. При любом дискомфорте во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.
5. Используйте с осторожностью лицам с физическими или умственными недостатками. Пожалуйста, используйте массажер только под наблюдением. При любом дискомфорте во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.
6. Пожалуйста, используйте его безопасно в безопасной среде.
7. Если вы чувствуете недомогание или испытываете какой-либо дискомфорт во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите использование продукта.
8. Не оставляйте данное изделие без присмотра, особенно там, где играют дети.
9. Не используйте массажер непосредственно на участках с опухшей или воспаленной кожей и на участках с открытыми ранами.
10. Не используйте в ванне или душе.
11. Не размещайте и не храните данное изделие в месте, где оно может упасть в ванну или раковину. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости, в этом устройстве. Хранить в сухом проветриваемом помещении.
12. Не используйте штифты или другие металлические крепежные элементы на этом устройстве. Хранить в сухом проветриваемом помещении.
13. Не работайте в среде с аэрозольными средствами или там, где используется концентрированный кислород.

Противопоказания!

Запрещено использовать массажер в следующих случаях:

- Беременность или послеродовой период.
- Если у вас есть кардиостимулятор или другой медицинский имплантат.
- Имеются заболевания сердца или сосудов.
- Аномальное кровяное давление или прохождение лечения для нормализации кровяного давления.
- Остеопороз переломов, переломы позвоночника, расхождение мышц и другие заболевания в острой фазе.
- При заболеваниях раком.
- После недавно перенесенной операции.
- При чувствительной коже или плохом кровообращении.
- В случаях повышенной температуры тела: выше 37 ° C, а также при имеющихся симптомах простудного заболевания.
- В случаях эмоционального выгорания, озноба, изменения кровяного давления, общей слабости.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

A. Проверка перед использованием

- Проверьте состояние ткани массажера.
- Проверьте, что он может работать должным образом при включении питания (а также в случаях, когда массажер не использовался долгое время).
- Могут оставаться следы использования. Чтобы этого избежать, пожалуйста, на, наденьте носки или брюки перед использованием массажера. После массажа могут оставаться следы на икрах, ступнях, коленях и бедрах от сдавливания.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тонкую одежду и брюки с застегивающимися молниями или металлическими предметами. Это может привести к повреждению изделия.

B. Подключение

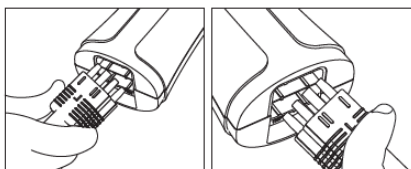

Подключите шланги, помеченные буквами "R" и "L" в соответствующие отверстия на пульте управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что буквы на шлангах обращены наружу. В противном случае изделие не будет работать должным образом.

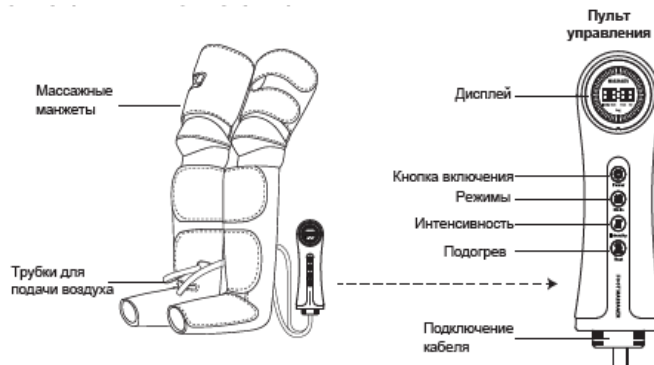

C. Порядок надевания.

- 1) Вставьте ступню в массажер - сначала обхватите ступню, а затем приклейте липучку к икре.
- 2) На бедре есть 2 липучки, которые можно регулировать в соответствии с окружностью ноги.
- 3) После фиксации липучек на ступне, голени и бедре, закрепите липучку на колене.

Совет: манжеты легче застегнуть в положении сидя.

При установке, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы липучка не прилипла к чулкам, свитеру и другой одежде, чтобы избежать возможных повреждений.

D. Готов к началу использования

[ПИТАНИЕ] (время использования по умолчанию - 15 минут)

Короткое нажатие кнопки питания для включения массажера. Экран загорается. Нажмите кнопку питания, чтобы настроить время работы. Каждое нажатие добавляет 5 минут,

до 30 минут. Длительное нажатие в течение 3 секунд выключает прибор. На экране отобразится



[РЕЖИМЫ] Нажмите кнопку Mode, чтобы переключить режим.

[-P1-] Режим последовательности (режим по умолчанию).

[-P2-] Модель циркуляции

[-P3-] Комбинированный режим

[ИНТЕНСИВНОСТЬ] Кнопка Intensity

[-L1-] Низкая интенсивность (интенсивность по умолчанию)

[-L2-] Вторая по величине интенсивность

[-L3-] Средняя интенсивность

[-L4-] Интенсивность выше среднего

[-L5-] Высокая интенсивность

[НАГРЕВ] Кнопка Heat

[-H0-] Обогрев отключен

[-H1-] Низкая температура (температура по умолчанию) около 40°C

[-H2-] Средняя температура - около 45°C

[-H3-] Высокая температура - около 50°C

Примечание: изделие нагревает только колленную часть.

Советы:

1. Для первого использования рекомендуется начинать с "низкого" уровня интенсивности, постепенно увеличивая интенсивность со временем.

2. Давление воздуха заметно после включения массажера, поэтому при первом использовании устанавливайте его в соответствии с положением липучки,

насколько это возможно. Вы можете отрегулировать липучки в соответствии с вашими потребностями.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

А. Очистка

Обязательно выключите питание и отсоедините шланг от розетки.

Никогда не используйте растворитель, бензин или спирт (это может привести к неисправностям, изменению цвета и т.д.)

1) Намочите ткань и отожмите ее

(Допустимо использовать нейтральное моющее средство, разбавленное теплой чистой водой)

2) Протрите массажер для ног изнутри и снаружи, не давите с большой силой.

Примечание:

Если мусор или волосы застряли в липучке, удалите их зубочисткой и т.д.

Не вставляйте посторонние предметы в выпускное отверстие заглушки шланга.

3. Пожалуйста, не стойте во время использования массажера, примите положение сидя или лежа, чтобы расслабиться и насладиться массажем.

В. Складирование

1) Приклейте липучки на ступни, лодыжки и икры сразу в соответствующие положения и загните часть стопы внутрь.

2) Согните лодыжку и икру, оберните соединительный шланг, а затем закрепите его с помощью застежки для ремня.

С. Хранение

Хранить в сухом, проветриваемом помещении, при температуре от -5 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 60%.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на массажер.

Храните в недоступном для детей месте.

Не кладите другие предметы на поверхность массажера (во избежание появления следов на поверхности или изменения цвета).

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

А. Сколько раз можно использовать в день?

Для вашей безопасности массажер автоматически выключится после 20 минут непрерывного использования. Мы не рекомендуем вам пользоваться массажером более 1 часа. Длительное применение приводит к чрезмерной стимуляции мышц и нервов и может иметь неблагоприятные последствия.

В. Можно ли использовать его для других частей тела, кроме стоп, икр, коленей и бедер?

Массажер предназначен только для ступней, икрах, коленей и бедер. Использование в других частях может привести к неблагоприятным последствиям или травме.

С. Для какого размера подходят ступни, икры и бедра?

Размер стопы: от 26 см до 36 см. Окружность икры: от 42 см до 55 см. Окружность бедер: от 53 см до 75,5 см.

Д. Сила слишком велика или слишком слаба.

Силу сдвливания можно регулировать в том числе ослабляя или сильнее натягивая липучки. Если манжета закреплена неплотно, то общая сила использования и давление будут относительно ослаблены. Напротив, если манжету закрепить плотнее, то общая интенсивность и давление будут усилены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если манжета закреплена слишком плотно, то застежка-липучка может сильно давить на кожу и вызвать дискомфорт. Вы можете подложить под застежку тонкий носовой платок.

Е. Воздух из шланга массажера не может выходить наружу.

Если в манжете осталось много воздуха, для ее выпуска может потребоваться некоторое время. Отсоедините шланг и подождите пока воздух выйдет естественным путем.

Ф. Если слышны следующие звуки. Это ненормально?

- Небольшое потрескивание застежки-липучки – Это допустимый звук натягиваемой/ открывающейся застежки-липучки, когда воздух поступает в манжеты.

- Жужжащий звук - Это звук, производимый в рабочем режиме. Это допустимо, т.к. обусловлено естественным дизайном конструкции массажера.

Изготовитель: Шэньчжэнь Фенитех Технолоджи Ко., Лимитед

Адрес: №1807, Сантай Билдинг, ХайТек Парк, Таоюань Стрит, Сили Таун, Наншан, Шэньчжэнь Сити, Китай

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63..

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Кепілдеме 6 ай.

Срок службы 6 месяцев. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender-global.com

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.